

ProChem B-D TLF121– Indicador Químico Classe II

Testes para Autoclaves Gravitacionais com Remoção de AR

Prochem B-D TLF121 – Pacote Pronto Uso

Catálogo: # CI-BDTLF121

20 / caixa

4 caixas / estojos


Expira 3 anos a partir da data de fabricação.

Pacote de teste de remoção de ar - Destinado a avaliar o desempenho do sistema de remoção de ar (vácuo) de esterilizadores a vapor com prévácuo a 121 ° C.

Pacote de teste descartável pré-montado. Após a exposição, desembulhe o pacote e remova a folha indicadora para seus registros.

Tinta sem chumbo na folha de indicadores - Mais segura para o pessoal médico e o meio ambiente.

Distinta mudança de cor rosa para preto não reversível – de fácil de interpretação.

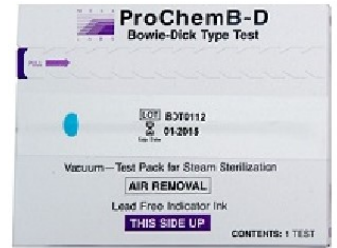

Procedimentos para uso

- Teste o esterilizador uma vez por dia.
- Teste no início de cada dia. Um ciclo encurtado deve ser usado para pré-aquecer o sistema (ou seja, omitir a fase de secagem). Se o esterilizador estiver em uso contínuo, o teste pode ser realizado a qualquer momento, mas deve ser testado ao mesmo tempo todos os dias.
- Coloque o pacote no suporte inferior na parte dianteira do esterilizador, perto da porta e sobre o dreno.
- O teste é mais preciso quando nada mais está na câmara, então não use esse ciclo para esterilizar itens ou embalagens. Outros itens neste ciclo podem invalidar o teste.
- Execute um ciclo prévácuo seguindo os parâmetros impressos nas instruções do indicador. Você pode eliminar a fase de secagem para economizar tempo sem afetar o teste.
- Após o ciclo estar completo, remova o pacote e abra para examinar a folha indicadora. CUIDADO! O pacote de teste ainda pode estar quente, então tenha cuidado ao manusear para evitar lesões.
- Grave as informações necessárias na folha (ou em um livro de registro) e armazene para seus registros.
- O pacote de papel de filtro pode ser descartado em uma lixeira de papel.

Interpretando os resultados do teste

- A FALHA é indicada por uma cor mais clara no centro do padrão que ao redor das bordas - falha do padrão mudar completamente para preto. Uma PASS é óbvia por uma cor preta uniforme em todo o padrão da folha indicadora.

ProChem B-D LF110 – Indicador Químico Classe II

Testes para Autoclaves Gravitacionais com Remoção de AR

Prochem B-D LF121 – Folhas Avulsas

Catálogo # CI-BD110

100 / pkg

Expira 3 anos a partir da data de fabricação

Apenas uso industrial internacional

- Folhas de teste individuais - uma deve ser colocada dentro de uma pilha de toalhas cirúrgicas que são montadas de acordo com as diretrizes da AAMI.
- Tinta sem chumbo na folha de indicadores - Mais segura para o pessoal médico e o meio ambiente.
- Atende a teste de remoção de ar AAMI, EN-867-3 e ISO 11140.
- Distintas, não reversíveis Mudança de cor azul a preto - fácil de interpretar



Procedimentos para uso

- Teste o esterilizador uma vez por dia.
- Teste no início de cada dia. Um ciclo encurtado deve ser usado para pré-aquecer o sistema (ou seja, omitir a fase de secagem). Se o esterilizador estiver em uso contínuo, o teste pode ser realizado a qualquer momento, mas deve ser testado ao mesmo tempo todos os dias.
- Coloque o pacote no suporte inferior na parte dianteira do esterilizador, perto da porta e sobre o dreno.
- O teste é mais preciso quando nada mais está na câmara, então não use esse ciclo para esterilizar itens ou embalagens. Outros itens neste ciclo podem invalidar o teste.
- Execute um ciclo prévácuo seguindo os parâmetros impressos nas instruções do indicador. Você pode eliminar a fase de secagem para economizar tempo sem afetar o teste.
- Após o ciclo estar completo, remova o pacote e abra para examinar a folha indicadora. CUIDADO! O pacote de teste ainda pode estar quente, então tenha cuidado ao manusear para evitar lesões.
- Grave as informações necessárias na folha (ou em um livro de registro) e armazene para seus registros.
- O pacote de papel de filtro pode ser descartado em uma lixeira de papel.

Interpretando os resultados do teste

A FALHA é indicada por uma cor mais clara no centro do padrão que ao redor das bordas - falha do padrão mudar completamente para preto. Uma PASS é óbvia por uma cor preta uniforme em todo o padrão da folha indicadora.

Distribuidor Exclusivo para o Brasil:



Cipamed Embalagens Médico-Hospitalares Ltda.

Av. Antonio Gomes da Silva Jr., 745 (Distr. Indl. Lagoinha)
Ribeirão Preto/SP - Brasil - CEP: 14.095-440
Tel. Comercial: (16) 4141 1939 / 98114 3344
Tel. Indústria: (16) 3965 6112 / 3965 6212
www.cipamedembalagens.com.br
email: fabio@cipamed.com.br

Certificados:

