

ProChem SSE (Steam Sterilization Emulator) Integrador de Classe 6 – Emulador para vapor

- Emulador para Esterilização a Vapor Classe 6
- Conforme ISO 11140-1: 2005
- Indicador específico de ciclo a vapor
- Mudança de cor roxa para verde
- Catálogo # CI-SSIX
- 250 indicadores / saco
- Expira 18 meses a partir da data de fabricação
- Adequado para ciclos de 132°C a 135°C




Catálogo # CI-SSIX
250 indicadores por pacote

ProChem SSE (Emulador de esterilização a vapor) é um AAMI / ISO Classe 6 Indicador Emulador Químico foi projetado para uso em esterilização a vapor. O **ProChem SSE** é único, pois é destinado a vários ciclos de esterilização a vapor: 3 minutos a 135°C (275°F) e 4 minutos a 132°C (270°F).

ProChem SSE é fabricado em uma instalação registrada pela FDA de acordo com os Regulamentos do Sistema de Qualidade da FDA (QSRs). Use **ProChem SSI** em conjunto com BIs, conforme descrito nos Padrões AAMI atuais e Práticas Recomendadas: Boas Práticas Hospitalar: esterilização a vapor e garantia de esterilidade. Use de acordo com as instruções na caixa.

Instruções de Uso

1. Coloque **ProChem SSE** no ponto mais difícil para esterilizar, coloque uma tira dentro de cada pacote / bandeja que será esterilizada. Para embalagens maiores, utilizar mais de uma tira. Não utilize o Integrador ProChem SSE se o indicador não estiver roxo original, antes da exposição ao vapor.
2. Execute o ciclo de esterilização a vapor, como de costume.
3. Após completar o ciclo, verificar visualmente se a tira indicadora mudou de roxo para verde, esta mudança indica de que foram alcançadas as condições de esterilização.
4. Se a tira não estiver verde, considere falho o processo de esterilização e os itens não estéreis. Siga o protocolo "in-house" para falha no ciclo.

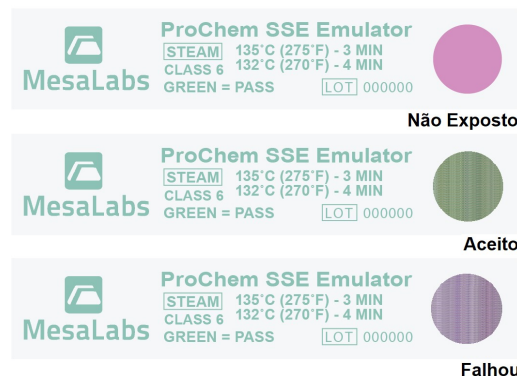

PARÂMETROS CRÍTICOS:

Obtidos em Autoclaves Standart

Tempo a 132°C	Tempo a 135°C
4 minutos	3 minutos

VALORES NORMATIZADOS:

Valores obtidos através de Resistômetro de Esterilização

Tempo a 132°C	Tempo a 135°C
4,5 minutos	3,75 minutos

Distribuidor Exclusivo para o Brasil:



Cipamed Embalagens Médico-Hospitalares Ltda.

Av. Antonio Gomes da Silva Jr., 745 (Distr. Indl. Lagoinha)
Ribeirão Preto/SP - Brasil - CEP: 14.095-440
Tel. Comercial: (16) 4141 1939 / 98114 3344
Tel. Indústria: (16) 3965 6112 / 3965 6212
www.cipamedembalagens.com.br
email: fabio@cipamed.com.br

Certificados:

